

## Ponseti™ AFO Tarjeta Ilustrado de Instrucciones



### Paso 1

Abra la órtesis para que todos los sujetadores de cuero son libres para la inserción de los pies. Las hebillas deben ser colocadas en el lado interior del pie.



### Paso 2

Tome la parte inferior de la pierna y deslice suavemente el pie en su lugar hasta que el talón quede ajustado contra las partes posterior y de abajo de la órtesis. (El talón quizás no pueda sentarse aplastado en el zapato hasta 2-4 semanas.)



### Paso 3

Tire de la lengüeta horizontalmente contra el tobillo y mantenga en su lugar con el pulgar. Asegúrese de que el agujero en la lengüeta se encuentra por encima de la correa del medio.



### Paso 4

Se abroche la correa del medio apretadamente sobre la lengüeta horizontal. Se abroche apretadamente la correa en el tobillo.



### Paso 5

Mira a través de la apertura del talón en la parte posterior de la órtesis para asegurar que el talón es totalmente abajo y hacia atrás. Si no, reajuste la lengüeta y correa del medio.



### Paso 6

Una vez que las correas superiores son muy ajustadas y el talón es perfectamente en su lugar, se abroche la correa de los pies y aprete las otras correas si es necesario. Abroche los zapatos sobre el barrote.