

ہدایات برائے استعمال Ponseti® لائٹ پاؤں کے زاویاتی انحراف (مرکز سے غیر معمولی فاصلہ) (Abduction) کی بریسنگ (FAB) پر مبنی سسٹم Ponseti® لائٹ بوٹس Ponseti® لائٹ بار

شائع کردہ: 2023

مطلوبہ استعمال اور اشارات

Ponseti® لائٹ FAB کا مقصد اسے ان بچوں کے لیے استعمال کرنا ہے جن کے ٹیڑھے پاؤں کو Ponseti® طریقہ علاج سے درست کیا جا رہا ہو۔
Ponseti® لائٹ FAB سسٹم Ponseti® لائٹ بار اور Ponseti® لائٹ بوٹ پر مشتمل ہے۔

Ponseti® لائٹ FAB کا مقصد درست شدہ ٹیڑھے پاؤں کی مجوزہ چوڑائی اور رخ بندی کا نظم کرنا ہے۔ مطابقت پذیر چوڑائی کے بار پر مبنی سسٹم معالجے کے منصوبے کے دوران مریضوں کو سہولت پہنچانے کے لیے متعدد کلپ لوکیشنز کا استعمال کرتا ہے اور "کوئٹ کلپ" سسٹم کے ذریعے Ponseti® لائٹ بوٹس کے کلپس کو باآسانی آن اور آف کرتا ہے۔ ظہری خمیدگی (عضو کا غیر معمولی طور پر عقبی جانب مڑا ہونا) (Dorsiflexion) اور عضو کے زاویاتی انحراف کو منضبط کردہ کوئٹ کلپ کے ساتھ 10 اور 15 ڈگریز پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم استعمال میں زیادہ آسانی فراہم کرتا ہے۔

Ponseti® لائٹ پاؤں کے زاویاتی انحراف کے فیتے (FAB) کا مقصد نومولود بچوں اور آٹھ برس یا اس سے کم عمر کے بچوں میں پیدائشی پاؤں کے ٹیڑھے پن کے مرض (CTEV) کی درستگی کے لیے Ponseti® طریقہ علاج میں استعمال کیے جانا ہے۔ اس فیتے کا مقصد مرض (ایڑھی کے جوڑے کی بالائی خمیدگی میں تحدید (equinus) اور ایڑھی کی اندر کی جانب غیر متوازی خمیدگی (varus)) کے واپس لوٹ آنے سے بچاؤ فراہم کرنا ہے۔

طی فوائد:

MD Orthopaedics کا Ponseti® لائٹ FAB سسٹم پیدائشی نقص شدہ پاؤں کی بدبیتھ کی ساختی طور پر درست کی گئی پوزیشن کو تب تک برقرار رکھتا ہے جب تک کہ نگہداشتِ صحت کا فراہم کار ڈاکٹر اگناسیو پونسیتی (Ignacio Ponseti) کے بیان کردہ (Ponseti® طریقہ کار) کے مطابق مؤثر تدبیر علاج اور کاسٹنگ کے بعد، نقص کے بگڑنے/دوبارہ نمودار ہونے اور/یا جراحی مداخلت کے نسبتاً کم خطرے کے ساتھ ڈیوائس کی مزید ضرورت نہیں رہنے کی نشاندہی نہ کر دے۔

تپاری کی معلومات

MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

صنعت کار ساز و سامان کی خرابی یا ایسی ذاتی چوٹوں کی صورتوں میں ذمہ دار نہیں ہے جو نامناسب ہینڈلنگ یا ہدایات کی عدم تعمیل کی وجہ سے واقع ہوں۔ ایسی صورتوں میں، وارنٹی کا عدم ہونا جائے گی۔ عام استعمال کے تحت Ponseti® لائٹ FAB سسٹم کی وارنٹی ایک سال ہے۔ عام استعمال سے مراد ایک واحد صارف کا اسے مطلوبہ استعمال کے مطابق چلانا ہے۔

MD Orthopaedics طبی علاج کے خطرات اور فوائد کے حوالے سے طبی علاج، مشورہ یا تجاویز فراہم نہیں کرتا، بشمول اس علاج کے جو MD Orthopaedics کی مصنوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان معلومات کی فراہمی نگہداشتِ صحت کے صرف اس فراہم کار کی جانب سے کی جانی چاہیئے جو آپ کے بچے کا علاج کر رہا ہو۔ اگر اپنے بچے کے علاج کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نگہداشتِ صحت کے کسی موزوں فراہم کار سے ان سوالات پر گفتگو کی جائے۔

ہدایات برائے صفائی

Ponseti® لائٹ بار



کسی ہلکے ڈیٹرجنٹ اور گیلے کپڑے کے استعمال سے صاف کیا جائے۔ اسے بھگویا نہ جائے۔

Ponseti® بوٹس



ٹھنڈا پانی، اور ہلکا ڈیٹرجنٹ استعمال کرتے ہوئے ہاتھ یا مشین کے ذریعے دھویا جائے۔ ہلکا دھلائی کا چکر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوا میں خشک کریں، ڈرائر میں نہ ڈالیں۔ اسے دھوتے ہوئے گرم پانی کے استعمال سے گریز کریں۔

تیاری کا عمل

Ponseti لائٹ FAB سسٹم کی ترسیل عام درجہ حرارت پر کی جاتی ہے اور ترسیل یا اسٹوریج کے دوران کوئی خصوصی ہینڈلنگ درکار نہیں ہوتی۔

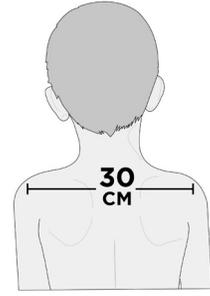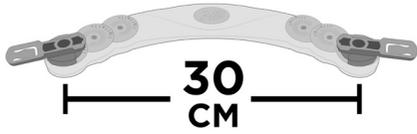

مرحلہ 1

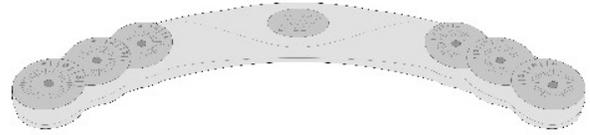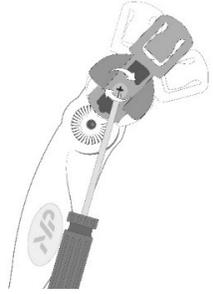

مرحلہ 2



مرحلہ 3

نوٹ: فراہم کار کی شیڈول کردہ تمام اپائنٹمنٹس میں حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ کندھے کی پیمائشیں اور بار کی چوڑائی کی ایڈجسٹمنٹس درست انداز میں مکمل کی گئی ہیں۔




سائز سے متعلق معلومات کے لیے info@mdorthopaedics.com پر ای میل کریں

1. بار کی چوڑائی بچے کے کندھے کی چوڑائی سے مماثل ہونی چاہیئے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کوٹک کلیپس کو کہاں ہونا چاہیئے۔





2. کوٹک کلیپس کو نگہداشت صحت کے فراہم کار کی تجویز کے مطابق مطلوبہ ظہری خمیدگی پر کوٹل کلب میں پیچ لگائیں۔ Phillips #2

3. بوٹ کو بچے کے پاؤں پر چڑھانے کے لیے بار کو ایک طرف کر دیں۔

بوٹ سے متعلق ہدایات

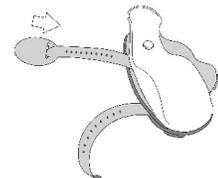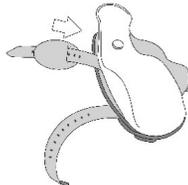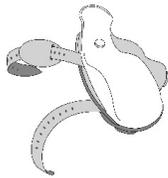

مرحلہ 1

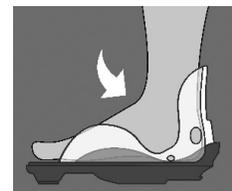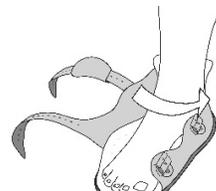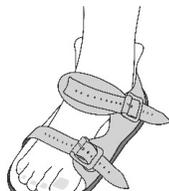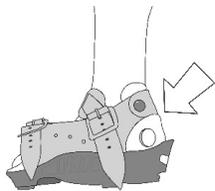

مرحلہ 5


مرحلہ 4

مرحلہ 3


مرحلہ 2

1. بالائی اسٹریپ کو چمڑے کے ڈھیلے حصے سے گزار کر داخل کریں۔
2. بچے کا پاؤں کھلے بوٹ میں داخل کریں، بکلز کو اندر کی جانب (دوسرے پاؤں کے رخ پر) رکھیں۔
3. اوپر کا اسٹریپ باندھیں اور اس جگہ پر بکل لگائیں۔
4. پاؤں کے اگلے حصے کا اسٹریپ بند کریں، اس دوران یقینی بنائیں کہ بچے کا پاؤں سیدھا رکھا ہو اور پاؤں کی انگلیاں سیدھی ہوں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ اتنا کسا ہوا ہو کہ بوٹ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔
5. ایڑھی کو مناسب جگہ پر رکھنے کے لیے بوٹ کے عقب میں سوراخ چیک کریں۔

بوٹ اور بار کو مربوط کرنے کی ہدایات

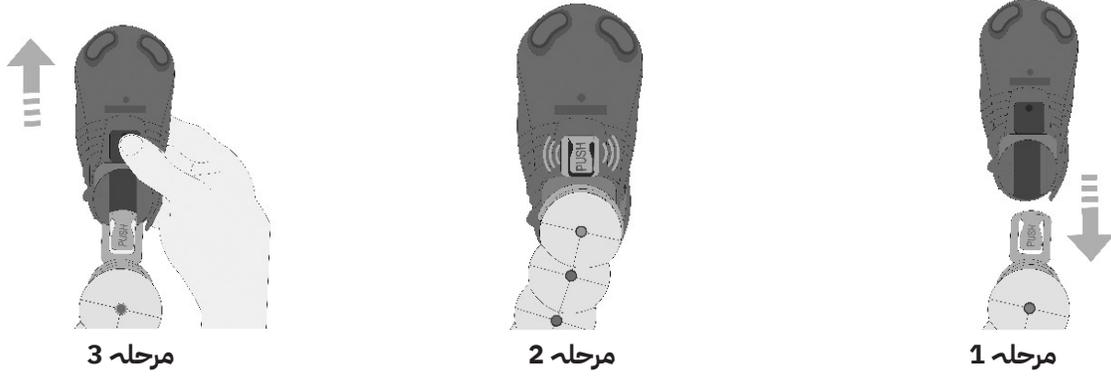


1. کلب کو بوٹ کے تلوے میں داخل کریں۔
2. اس وقت تک دبائیں جب تک آپ کو "کلک" کی آواز نہ سنائی دے۔ بوٹ کو کھینچ کر اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کوٹک کلیپس لگ گئے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ بار سے الگ نہ ہو۔
3. بوٹ کو بار سے الگ کرنے کے لیے، بار کو پیچھے کھینچتے ہوئے اس وقت تک پُش (PUSH) کو زور سے دبائیں جب تک یہ نکل کر آزاد نہ ہو جائے۔

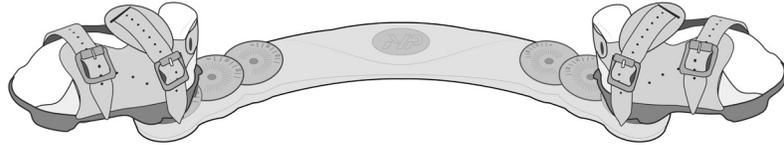

مندرجہ بالا تصویر میں بوٹس اور بار کو مکمل طور پر جڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔

توسیعی اجزاء کا اضافہ

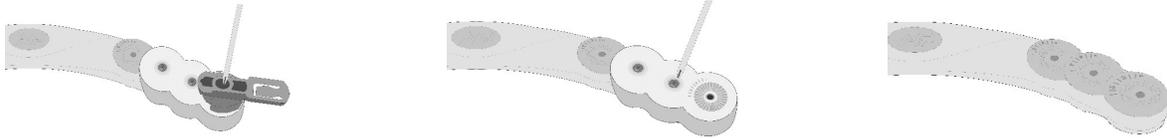

1. توسیعی جزو کو بار کے اوپر رکھیں۔
2. 2 Philips پیچ کس کے ذریعے کسنے کی ضرورت ہو گی۔ یقینی بنائیں کہ پیچ کسے ہوئے ہوں۔
3. توسیعی جزو کو باندھ لینے کے بعد، کلب کو بار پر مطلوبہ مقام پر رکھیں اور توسیعی جزو پر کوٹک کلیپ کو کس دیں۔
4. جب کلب بار پر بندھ جائے تو بوٹ کی ہدایات پر عمل کریں۔

واپستہ خطرات اور معکوس علامات

ایسے بوٹس یا بار ہرگز استعمال نہ کریں جو کہیں سے خراب ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں یا ٹھیک سے کام نہ کرتے ہوں۔
Ponseti لاٹھ FAB سسٹم کے سلسلے میں تجدید کاری کی تجویز نہیں دی جاتی۔

استعمال سے متعلق حفاظتی معلومات

- 0 نگہداشت صحت کے مستند فراہم کار کی ہدایات یا معالجے کے منصوبے پر عمل کریں۔
- 0 اگر بچے کو درد، چھالوں، یا زخموں کا سامنا ہو، یا اگر بوٹ واضح طور پر بچے کے پاؤں سے پھسل رہا ہو، تو فوری طور پر اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کار سے رجوع کریں۔
- 0 بوٹس پہنتے وقت جرابیں پہننا ضروری ہے۔
- 0 **نوٹ:** جرابوں کا استعمال بوٹ کے پھسلنے، درد ہونے، جلد کے سرخ ہونے، چھالوں، اور زخموں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
- 0 بچوں کو بوٹس اور بار پہن کر نہ تو کھڑے ہونا چاہیئے نہ ہی چلنا چاہیئے۔

اگر کسی صارف اور/یا مریض کو ڈیوائس کے حوالے سے پیش آنے کسی تشویش ناک واقعے کا سامنا ہو، تو اسے MD Orthopaedics, Inc. اور اس مجاز اتھارٹی کو رپورٹ کرنا چاہیئے جس کے دائرہ کار میں صارف اور/یا مریض کو رکھا گیا ہو۔

محفوظ تلفی

بوٹس اور بار کو عام کوڑا کرکٹ میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس ڈیوائس کے جزویات میں سے کوئی بھی دوبارہ کارآمد نہیں بنائے جا سکتے۔

ڈیوائس کا دوبارہ استعمال

تمام حصہ جات کو استعمال کی عمومی صورتوں میں اور نگہداشت صحت کے فراہم کار کے مشورے کے مطابق استعمال کیے جانے کی غرض سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ عمومی استعمال میں بوٹس اور بار کا یومیہ 23 گھنٹوں تک کا روزانہ استعمال، یا پھر نگہداشت صحت کے فراہم کار کی تجویز کے مطابق استعمال شامل ہے۔

علاماتی فہرست

علامت	معنی	علامت	معنی
	انتباہ		بوٹس
	تیار کی تاریخ		یورپی کمیونٹی میں موجود مستند نمائندہ
	ریکارڈ درآمد کنندہ		صنعت کار
	غیر سٹیرائل		ایک مریض، متعدد استعمال
	کیٹلاگ نمبر		نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے ایک میڈیکل ڈیوائس ہے
	بیچ کوڈ		CE نشان (یورپی پارلیمنٹ کے ضابطہ (EU) 2017/745 اور 5 اپریل 2017 کو منعقدہ کونسل بسلسلہ طبی ڈیوائسز کے تابع)
	برقی ہدایات برائے استعمال		اہم تصور کی جانے والی معلومات، تاہم یہ خطرے سے متعلقہ نہیں
			سویٹزرلینڈ میں موجود مجاز نمائندہ

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2494 AM The Hague
The Netherlands



MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

