

# Move-D

Um dispositivo ortótico mecânico portátil de membro superior para redução de tremores

## Instruções de uso do Move-D



  
(01) 00860001704877

REF 3626-90015 LOT XXXXXXXXXXXXXXXX  
[ LOT BARCODE HERE ]

**Move-D Brace, Left**

 Consult Instructions for Use  
 Non-sterile  
 MR Unsafe  
 Single patient - multiple use

Manufacturer: iiLabCo LLC  
975 W Imperial Highway  
Suite 140, Brea, CA  
92821 USA  
Labco@ii4change.com  
949.531.4140

Distributor: OrthoPediatrics Corp.  
2850 Frontier Dr.  
Warsaw, IN 46582, USA

(QTY: 1)

MADE IN CHINA  
P/N 3626-XXXXX REV X

  
(01) 00860001704877

REF 3626-90001 LOT XXXXXXXXXXXXXXXX  
[ LOT BARCODE HERE ]

**Move-D Brace, Right**

 Consult Instructions for Use  
 Non-sterile  
 MR Unsafe  
 Single patient - multiple use

Manufacturer: iiLabCo LLC  
975 W Imperial Highway  
Suite 140, Brea, CA  
92821 USA  
Labco@ii4change.com  
949.531.4140

Distributor: OrthoPediatrics Corp.  
2850 Frontier Dr.  
Warsaw, IN 46582, USA

(QTY: 1)

MADE IN CHINA  
P/N 3626-XXXXX REV X


# Índice

USO PREVISTO .....	3
DETALHAMENTO DAS PEÇAS DO MOVE-D .....	4
CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS .....	4
INSTRUÇÕES PARA O AJUSTE DO DISPOSITIVO .....	5
INSTRUÇÕES DE USO .....	6
COMO TROCAR O MOVE-D DO BRAÇO DIREITO PARA O ESQUERDO .....	8
COMO TROCAR O MOVE-D DO BRAÇO ESQUERDO PARA O DIREITO .....	9
INSTRUÇÕES PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM .....	10
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA .....	12
SÍMBOLOS .....	13




## Uso previsto

O Move-D destina-se ao uso por pacientes com tremores no membro superior dominante para estabilizar os tremores e melhorar o desempenho das atividades da vida diária (AVD).

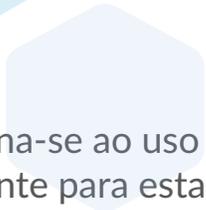

## Detalhamento das peças do Move-D

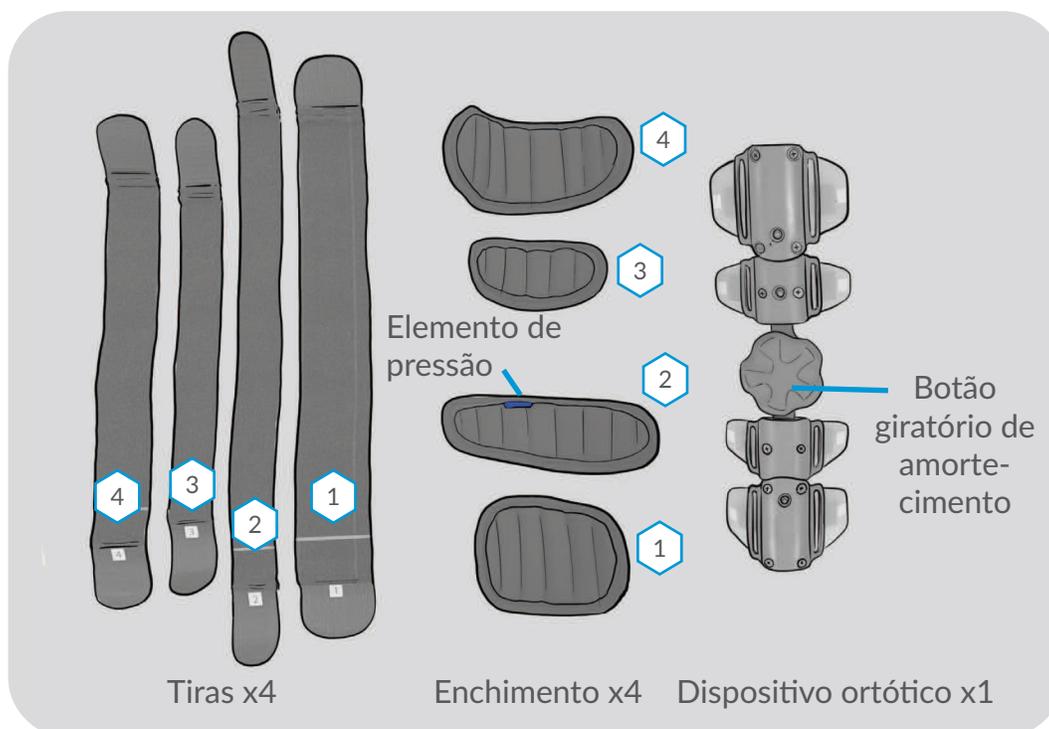

### Cuidados


- O dimensionamento/ajuste incorreto do Move-D no braço pode fazer com que o dispositivo funcione de forma inadequada e/ou não proporcione qualquer tipo de amortecimento.
- Certifique-se de que o dispositivo Move-D esteja adequadamente ajustado ao braço para evitar qualquer desconforto e/ou complicações durante o uso.
- O uso do Move-D com o nível de amortecimento incorreto associado à atividade da vida diária pode causar dores musculares e/ou fadiga para o usuário.

### Advertências


- Não manter o dispositivo higienizado e limpo durante o uso pode causar irritação indesejada na pele e/ou uma reação alérgica.
- A colocação incorreta do Move-D várias vezes pode causar lesões físicas indesejadas, como escoriações e hematomas, diminuição da integridade da pele ou irritação da pele, irritação dos nervos e/ou diminuição da circulação sanguínea.

**Interrompa o uso e entre em contato com o seu médico se sentir desconforto, inchaço ou irritação na pele (incluindo vermelhidão) por mais de 20 minutos e/ou se sentir qualquer sensação de formigamento ou dormência.**


## Instruções para o ajuste do dispositivo

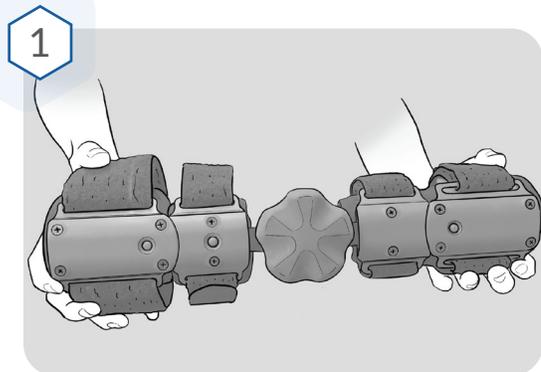


1 Prepare o Move-D colocando-o em uma posição reta/neutra. Pode ser necessário afrouxar o botão giratório para alcançar a posição desejada.

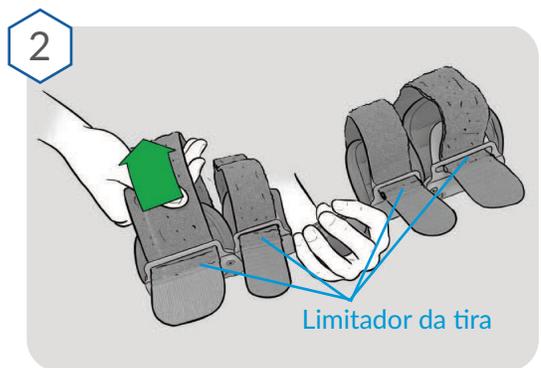

2 Solte todas as quatro tiras até o limitador da tira. Os limitadores das tiras impedem que elas se soltem facilmente.

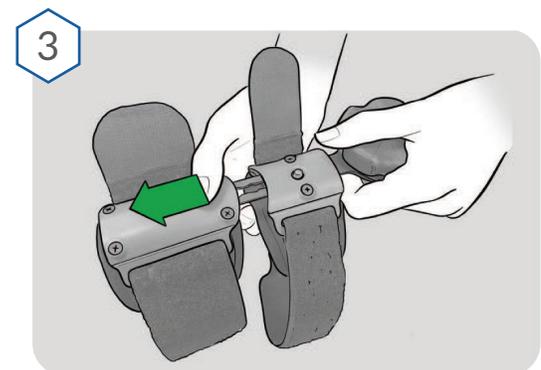


3 Usando os botões nas partes superior e inferior do Move-D, estenda-o conforme necessário até obter o comprimento correto para o braço dominante do usuário.

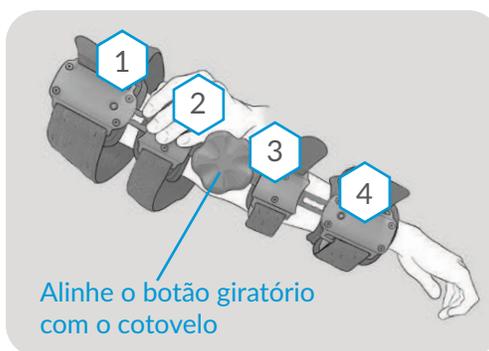

4 Alinhe o Move-D ao longo do braço dominante do usuário com o botão giratório de amortecimento no cotovelo do usuário. A seção 1 estará mais próxima do ombro do usuário e a seção 4 estará mais próxima do punho do usuário.

## Instruções de uso

As instruções abaixo devem ser seguidas para garantir o uso adequado do Move-D durante a realização das atividades da vida diária

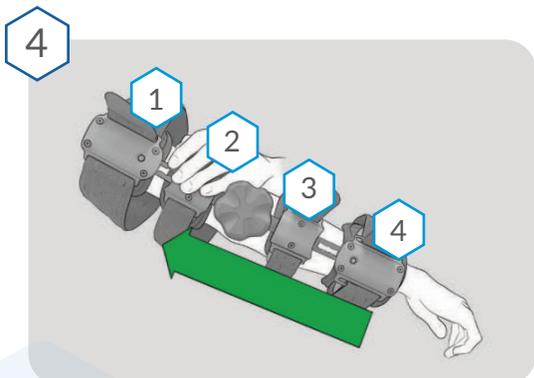



Começando pela seção 1, deslize o dispositivo pelo braço dominante do usuário, alinhando o botão giratório com o cotovelo do usuário.




A seção 1 do Move-D estará mais próxima do ombro do usuário e a seção 4 estará mais próxima do punho do usuário.




O elemento de pressão de tecido mole (lingueta azul) deve ser posicionado acima do ponto lateral (externo) do cotovelo, sobre o músculo tríceps.

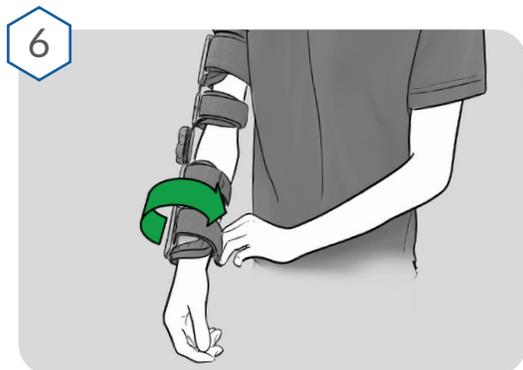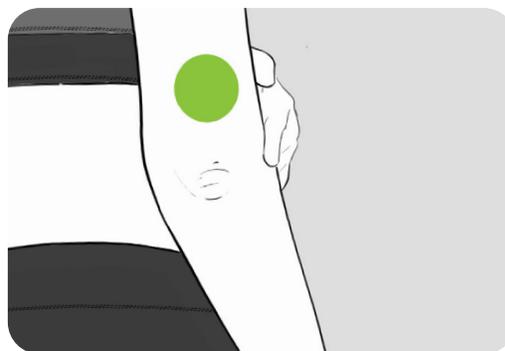


Aperte todas as quatro tiras até que o dispositivo esteja ajustado e confortável.

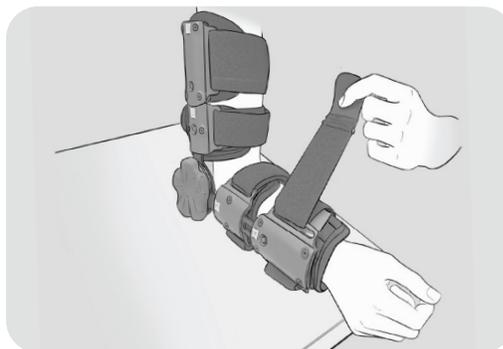


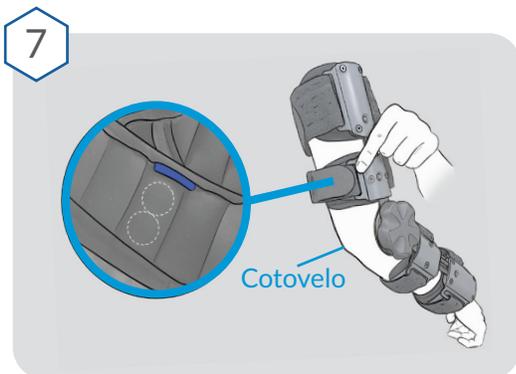

Confirme se o elemento de pressão do nervo (lingueta azul) no enchimento 2 está posicionado sobre o ponto lateral (externo) do cotovelo, sobre o músculo tríceps.

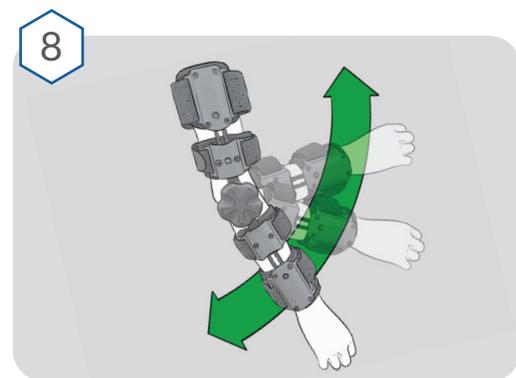

Dobre o braço para garantir o conforto do usuário com o Move-D colocado.

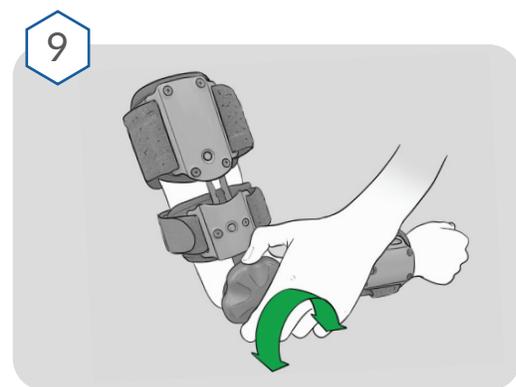


Gire o botão giratório para apertar/afrouxar para obter o nível de amortecimento desejado, dependendo das atividades da vida diária.


# Como trocar o Move-D do braço direito para o esquerdo

As instruções abaixo detalham como configurar o Move-D para uso no braço esquerdo



## 10 Posicionamento para mão direita

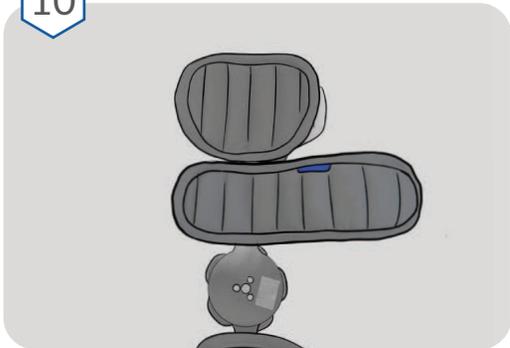

## Posicionamento para mão esquerda

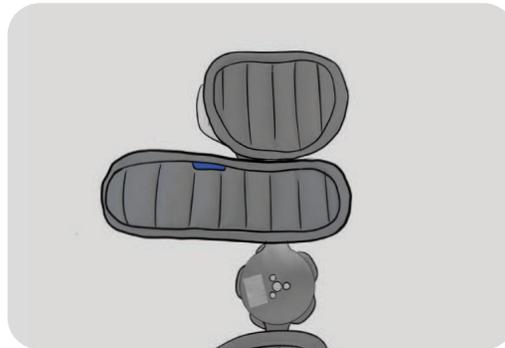

Localize o enchimento 2. Remova-o e gire-o em 180 graus (braço direito = lingueta azul para baixo, braço esquerdo = lingueta azul para cima).

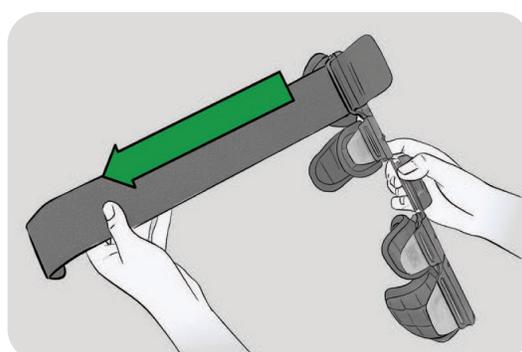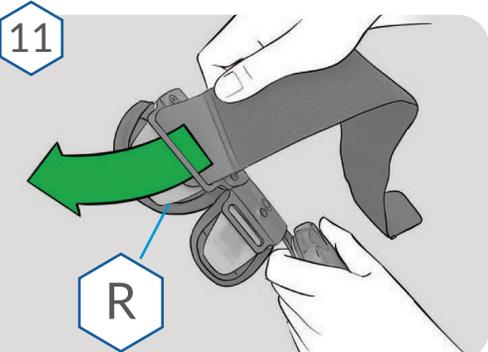



Remova todas as 4 tiras:

- Pegue a extremidade da tira 1, sem o limitador da tira e com o lado do velcro para baixo, e insira-a no lado "R" da seção 1.
- Puxe a tira até que o limitador da tira impeça que ela saia do lado "R" da seção 1.



Puxe a tira ao redor do lado do enchimento do dispositivo ortótico.


Insira a tira, com o lado do velcro para cima, no lado "L" da seção 1. Prenda a parte de velcro na tira na linha bordada.

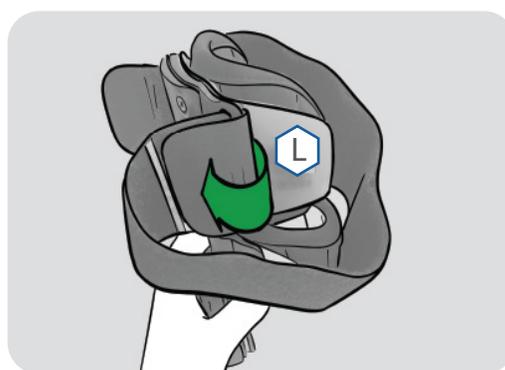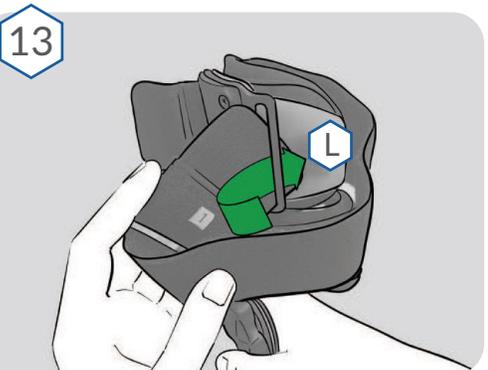


# Como trocar o Move-D do braço esquerdo para o direito

As instruções abaixo detalham como configurar o Move-D para uso no braço direito



## 14 Posicionamento para mão direita

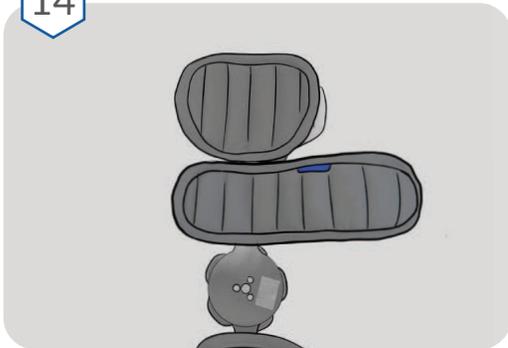

## Posicionamento para mão esquerda

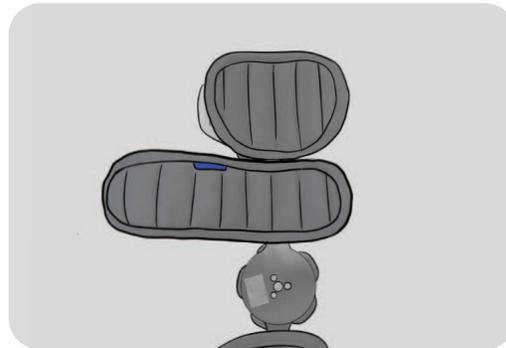


Localize o enchimento 2. Remova-o e gire-o em 180 graus (braço direito = lingueta azul para baixo, braço esquerdo = lingueta azul para cima).

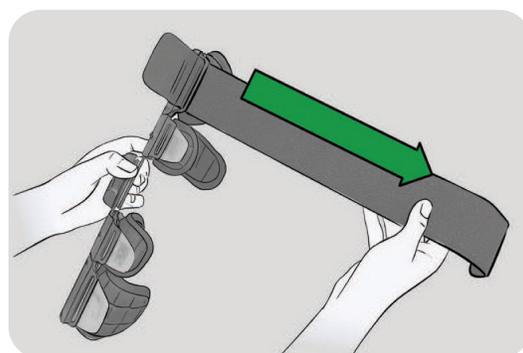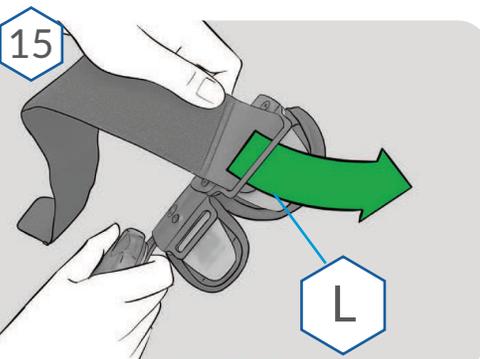


Remova todas as 4 tiras:

- Pegue a extremidade da tira 1, sem o limitador da tira e com o lado do velcro para baixo, e insira-a no lado “L” da seção 1.
- Puxe a tira até que o limitador da tira impeça que ela saia do lado “L” da seção 1.

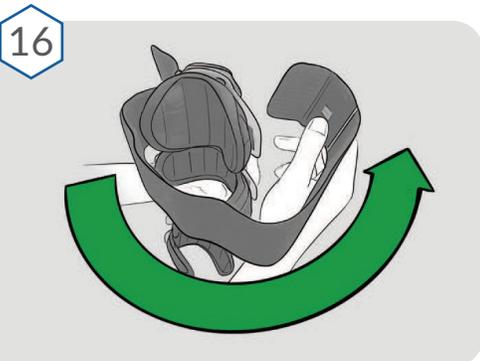

Puxe a tira ao redor do lado do enchimento do dispositivo ortótico.


Insira a tira, com o lado do velcro para cima, no lado “R” da seção 1. Prenda a parte de velcro na tira na linha bordada.

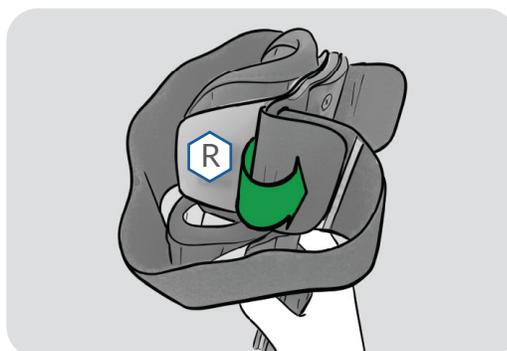

# Instruções para desmontagem e remontagem


## Desmontagem

18

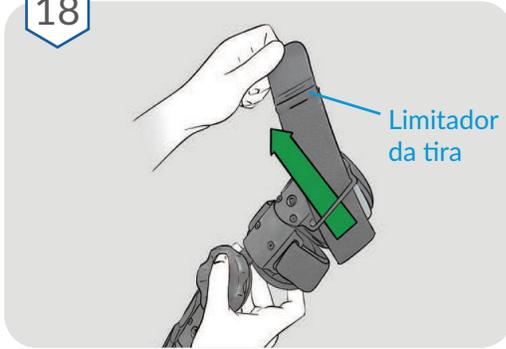

Remova todas as tiras usando a extremidade com o limitador da tira.

19

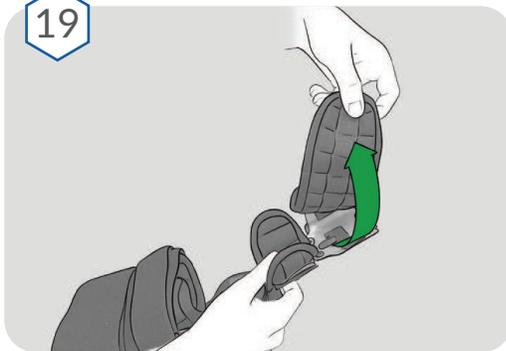


Remova todo o enchimento.

## Remontagem

Para remontar, siga as etiquetas correspondentes nas tiras e no enchimento do dispositivo ortótico.


20

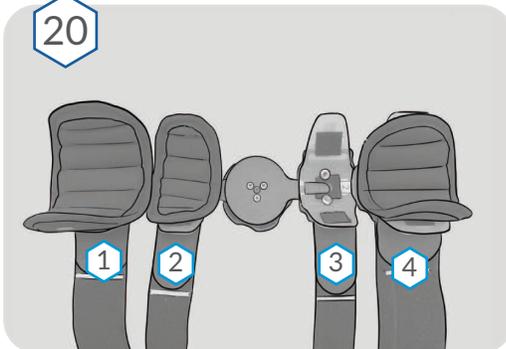


Para remontar, recoloque os enchimentos 1, 3 e 4 na seção com as etiquetas correspondentes (veja abaixo as instruções para o enchimento 2).

21

Posicionamento para mão direita

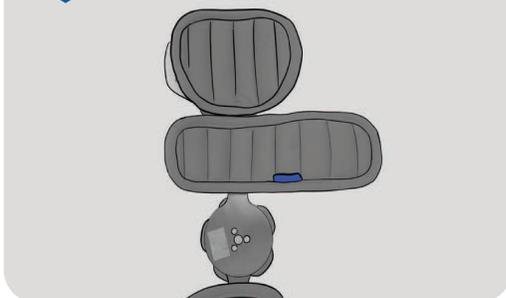


Posicionamento para mão esquerda

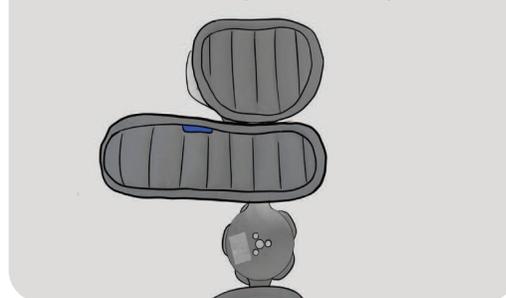


Para o enchimento 2, recoloque-o com a lingueta azul orientada para o lado apropriado com base no braço dominante do usuário (braço direito = lingueta azul para baixo, braço esquerdo = lingueta azul para cima).

Recoloque todas as 4 tiras seguindo as etapas abaixo para usuários com braço direito dominante (consulte a configuração com braço esquerdo dominante na página 8 para usuários com braço esquerdo dominante).

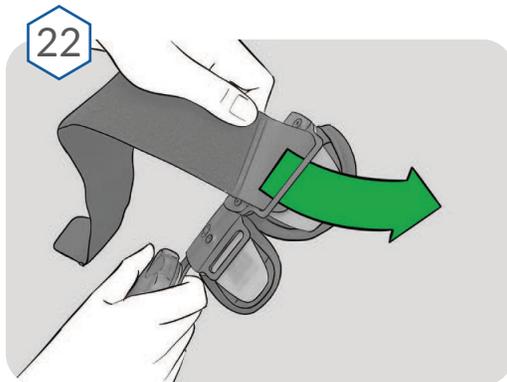



Para o braço direito, pegue a extremidade da tira 1, sem o limitador da tira e com o lado do velcro para baixo, e insira-a no lado “L” da seção 1.

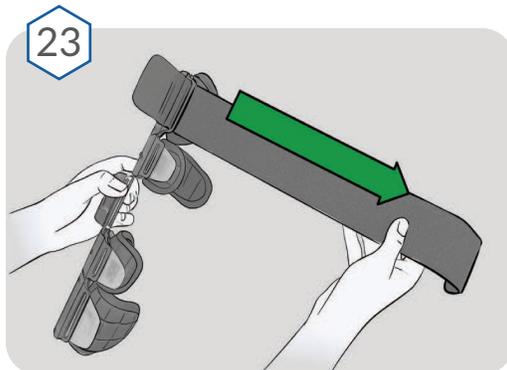

Puxe a tira até que o limitador da tira impeça que ela saia do lado “L” da seção 1.



Puxe a tira ao redor do lado do enchimento do dispositivo ortótico.

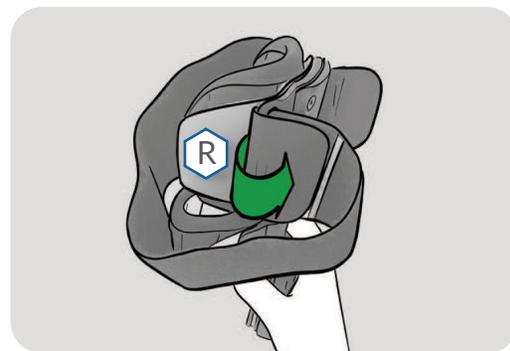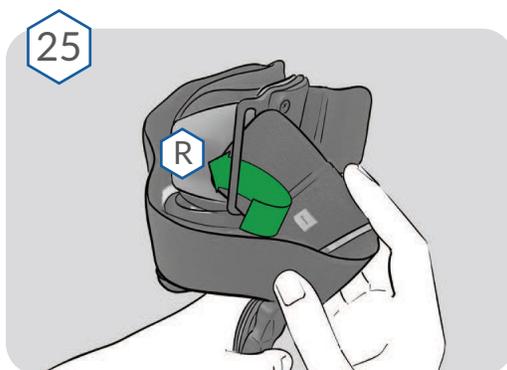

Insira a tira, com o lado do velcro para cima, no lado “R” da seção 1. Prenda a parte de velcro na tira na linha bordada.

## Instruções de limpeza

1. Superfícies rígidas do Move-D, incluindo o botão giratório de amortecimento:
  - a. As superfícies rígidas do Move-D devem ser limpas com um pano macio umedecido em uma solução de água e sabão neutro, álcool isopropílico (70%) ou com um dos seguintes agentes de limpeza, seguindo as recomendações do fabricante.
    - i. Limpador em espuma desinfetante Lysol.
    - ii. Pure Green 24 da Pure Green, LLC.
2. Tiras e enchimento:
  - a. As tiras e o enchimento são removíveis e podem ser lavados na máquina em configurações de máquina pouco intensas ou para roupas delicadas. As tiras e o enchimento devem ser limpos pelo menos uma vez por mês com um detergente suave para tecidos e secos ao ar.

# Símbolos

	Número do lote
	Número de referência
	Fabricante e data de fabricação
	Consulte as instruções de uso ou consulte as instruções de uso eletrônicas
	Único paciente – usos múltiplos
	Incompatível com RM
	Não estéril
	Distribuidor

OrthoPediatics, ArmorLink, BandLoc Duo, Drive Rail, PediFlex, PediFoot, PediFrag, PediGraft, PediLoc, PediNail, PediPlates, PLEO, QuickPack, RESPONSE, Scwire, ShieldLoc, TorqLoc, PediPedal e os logotipos OP e Pedi são marcas comerciais da OrthoPediatics Corp. ApiFix, Boston Brace 3D, Dror Paley's Osteotomy System, Fassier-Duval Telescopic Intra-Medullary System, The Free Gliding SCFE Screw System, GapNail, Giro, The Hinge Pediatric Plating System, Lollipop, Orthex, Pega Medical, Slim e os logotipos GapNail, Hinge Plate e Slim são marcas comerciais de subsidiárias integrais da OrthoPediatics Corp. Boston O & P, Boston Orthotics and Prosthetics, Boston AFO, Boston Band, Bostone Brace e Boston 3D são marcas de serviço de uma subsidiária integral da OrthoPediatics Corp.

OrthoPediatics é uma marca comercial registrada no Brasil, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. PediLoc e PediPlates são marcas comerciais registradas no Chile e nos EUA. O logotipo OP é uma marca comercial registrada na Colômbia, na União Europeia, no Japão e nos EUA. O logotipo Pedi é uma marca comercial registrada na Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, União Europeia, Israel, México, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia e Estados Unidos. ApiFix é uma marca comercial registrada nos EUA. ArmorLink é uma marca comercial registrada nos EUA. Scwire é uma marca comercial registrada nos EUA. ShieldLoc é uma marca comercial registrada nos EUA. TorqLoc é uma marca comercial registrada nos EUA. Bandloc Duo é uma marca comercial registrada nos EUA. Boston Brace 3D é uma marca comercial registrada nos EUA. Orthex é uma marca comercial registrada nos EUA. QuickPack é uma marca comercial registrada nos EUA. Fassier-Duval Telescopic Intra-Medullary System é uma marca comercial registrada no Brasil, na União Europeia e nos EUA. The Free Gliding SCFE Screw System é uma marca comercial registrada na União Europeia e nos EUA. O logotipo GapNail é uma marca comercial registrada na União Europeia e nos EUA. The Hinge Pediatric Plating System é uma marca comercial registrada nos EUA. O logotipo Hinge Plate é uma marca comercial registrada nos EUA. Lollipop é uma marca comercial registrada na União Europeia e nos EUA. Giro é uma marca comercial registrada no Canadá e nos EUA. Pega Medical é uma marca comercial registrada no Canadá, na União Europeia e nos EUA. O logotipo Slim é uma marca comercial registrada na União Europeia e nos EUA. Boston O & P, Boston Orthotics and Prosthetics, Boston AFO, Boston Band, Boston Brace e Boston 3D são marcas de serviço registradas nos EUA.



2850 Frontier Drive | Warsaw, IN 46582  
tel: 574.268.6379 or 877.268.6339 | fax: 574.268.6302  
www.OrthoPediatics.com

  
<https://opsb.com/>